


BEDTIME
HEALTHCARE

Quick guide RobinAir

Fastheten i madrassen reguleres via håndpanelet til pumpen. Ved innstilling må brukeren ligge på madrassen (se til at luftkammeret har litt luft i seg før brukeren legges på madrassen). For å aktivere pumpen trykk på en knapp, trykket i madrassen vil komme opp i displayet.

- For fastere underlag: trykk ▲ (Pumpa stopper på maks 60)
- For å stoppe pumpen: Trykk på den samme piltasten igjen
- For mykere underlag: trykk ▼
- For å stoppe pumpen: Trykk på den samme piltasten igjen
- For å memorere et trykk: Trykk MEM

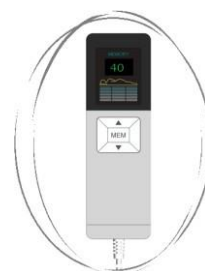

Veiledende skjema etter brukers vekt for innstilling av madrass:

Vekt:	Veiledende trykk:
30-40 kg	5
40-50 kg	10
50-60 kg	15
60-70 kg	20
70-80 kg	25

Vekt:	Veiledende trykk:
80-90 kg	30
90-100 kg	35
100-110 kg	40
110-120+ kg	45
Forflytning/stell	45+

FORFLYTNING

Man kan enkelt gjøre underlaget fastere for enklere forflytning/stell:

1. Aktiver håndkontrollen ved å trykke på en knapp.
2. Tast ▲. Madrassen vil blåse seg opp til maks. og stanse.
3. Madrassen er nå fast og forflytning/stell kan gjøres.
4. Mens bruker ligger i madrassen, tast **MEM**. Madrassen går til det memorerte trykket.
5. Dersom det ikke er memorert et trykk, tast ▼. Avslutt ved å taste ▼ på nytt.