


SPANAmerica
Innovative Solutions.

Custom Care Manual

Sist oppdatert: 01/2024

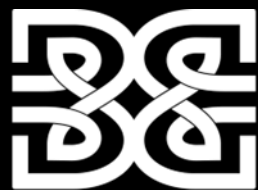

BEDTIME
HEALTHCARE

Produktoversikt



1
2

Bruerveiledning Custom Care helmadrass

Takk for at du har valgt Custom Care madrassen! Denne brukermanualen bør leses før bruk da den inneholder viktig informasjon om sikker bruk og vedlikehold. Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt leverandør.

Indikasjoner for bruk:


Anbefalt for bruk i forebygging og behandling av kategori I og II trykksår, og for behandling av ukompliserte sår i kategori III og IV med flere vendeflater.

Bekreft at sengerammen er egnet for bruk med madrassen, og at lengden og bredden på madrassen passer til rammen. Plasser kun direkte på en sengeramme for helsevesenet, aldri på toppen av en annen madrass.

Produktoversikt

Forsendelsen inneholder følgende:

1. Custom Care helmadrass
2. Brukermanual

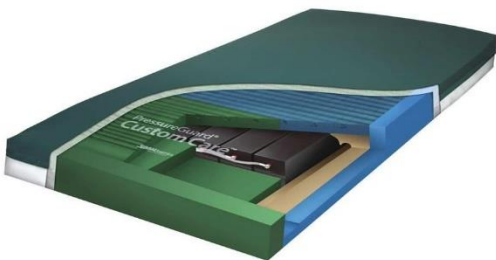

Rengjøring og desinfisering av madrassstrekk:

Tørk av med nøytralt såpeskum og lunkent vann. Skyll av med en fuktig klut og la den lufttørke i 20–30 minutter. Ikke nedsenk eller ellers utsett madrassen for overdreven fuktighet. For vanskelige flekker, bruk en myk børste eller svamp med et godkjent desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. For desinfisering, desinfiser madrassen med et desinfeksjonsmiddel av sykehuskvalitet. Vi anbefaler fenol eller desinfeksjonsmidler av kvaternær type. Følg produsentens instruksjoner for brukskonsentrasjoner og kontakttider. Vasking anbefales ikke. Overdreven fuktighet og varme kan skade madrassstrekk. For å beskytte garantien må du bruke et godkjent rengjøringsmiddel og skylle alt ordentlig rengjøringsmidler og desinfiserende kjemikalier etter påføring.

Vektgrenser:

Støtter opptil 225 kg.

Advarsel:

Innsydde håndtak er for madrasstransport, ikke pasienttransport. Madrass skal ikke være transporteres mens en pasient ligger på overflaten.

Advarsel:

Undersøk overflaten med jevne mellomrom for å sikre at det ikke er hull eller rifter i dekselet. Bioforurensning kan oppstå og føre til personskaade

Bedtime AS


Stortingsgata 30

0161 Oslo

Tel. (+47) 67 11 10 80

post@sofies.no

www.sofies.no

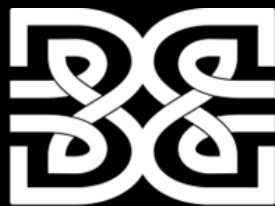

BEDTIME
HEALTHCARE