




# Mendo Medic II Overmadrass Manual

Modellnummer:  
0802XXM (X = 0-9)

Sist oppdatert: 01/2024

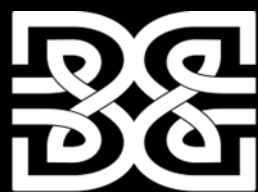

**BEDTIME**  
HEALTHCARE

Innholdsfortegnelse

1

Bakgrunn

2

Omfang

3

Definisjoner

4

Bruker

5

Rengjøring

6

Feilsøking

7

Etterbruk

8

Notater

9

Notater

10

# 1. Bakgrunn

Mendo Medic II overmadrass er en trykkfordelende overmadrass av høy kvalitet. Overmadrassen er norskprodusert med en kjerne av viskoelastisk skum. Det viskoelastiske skummet påvirkes av kroppstemperaturen, og former seg etter kroppen. Dette gjør at brukeren synker ned i madrassen slik at trykket fordeler seg over en større flate.

Overmadrassen er trykkfordelingstestet, og testet for lang holdbarhet med meget gode resultater.

Tekniske data:

Mendo Medic II overmadrass leveres med Medicare inkontinenstrekk som standard Glidelås på 3 sider. Kan også leveres med «leppe» over glidelåsen, eller helsveiset ved forespørsel

Kan leveres med Bomullstrekk - Bomull/polyester med glidelås på en kortside., vaskbart på 40°C.

Madrassen kan også leveres med Pyroprotex trekk: Flammehemmende med glidelås på 3 sider, vaskbart ved 40°C.

Tekstilet er Økotex standard 100 klasse 1. Trekket er branntestet mot kravene i BS6807, NS EN 597 1 og NS EN 597 2.

5 cm tykkelse for brukere opp til 200 kg. Kjernen er branntestet mot kravene i NS EN 597 1 og 1021 1.

Skumplasten er produsert etter miljøkravene i Certipur .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## 2. Omfang

Dette dokumentet definerer bruksspesifikasjonen for  
Mendo Medic II overmadrass i samsvar med IEC62366:2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

### 3. Definisjoner

Term: Definisjon

Bruker: Brukes av alle pasienter som vanlig madrass

Operatør: Pleiepersonell, pårørende eller bruker som operer produktet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## 4. Brukerspesifikasjon

### 4.1 Tiltentk medisinsk indikasjon;

Bruk av Mendo Medic II overmadrass er egnet for alle pasienter som blir innlagt på sykehus, institusjon eller hjemmepleie, der målet er forebygging eller behandling av trykksår opp til og med kategori 2 sår.

### 4.2 Tiltentk pasient.

Mendo Medic II overmadrass er ment å brukes av pasienter 18 år eller eldre med en kroppsvekt på 200 kg eller under.

### 4.3 Tiltentk operatør

Mendo Medic II overmadrass kan betjenes av alle

### 4.4 Tiltentk bruksmiljø

Mendo Medic II overmadrass er egnet for bruk på sykehus, sykehjem eller hjemmemiljø.

### 4.5 Driftsprinsipp.

Mendo Medic II overmadrass har alle funksjonene til en vanlig sykehusmadrass.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## 5. Rengjøring

Mendo Medic II overmadrass leveres med Medicare inkontinenstrekk som standard. Dette trekket kan vaskes med fuktet klut og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.

Trekket er avtagbart og kan vaskes i vaskemaskin for tekstiler ved 60°C. Bomullstrekk (tilbehør) kan vaskes i vaskemaskin for tekstiler ved 40°C.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## 6. Feilsøking

### Problem

Madrassen føles ukomfortabel.

### Løsning

Gjør en visuell inspeksjon av madrassen, dersom trekk er utsatt for skader eller slitasje, bør dette byttes. Dersom madrassen er brettet, vennligst legg den fullstendig ut for korrekt bruk.

Dersom dette ikke hjelper, åpne trekket og gjør en visuell inspeksjon av skummet. Dersom der har oppstått sprekker eller skader i skummet, bør dette byttes ut for optimal komfort.

### Problem

Madrassen er for hard

### Løsning

Madrassen er laget av viskoelastisk skum (også kalt Memory Foam), som påvirkes av den omkringliggende temperaturen. Dersom rommet er veldig kaldt, vil madrassen være hard. Etter hvert som bruker ligger i madrassen vil kroppstemperaturen gjøre at bruker synker godt ned i madrassen for optimal trykkfordeling. Påse derfor at man har lugget tilstrekkelig lenge nok til at det viskoelastiske skummet får tilpasset seg kroppen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



# 7. Etterbruk

## 7.1 Lagring

- Madrassen skal lagres i et tørt miljø
- Dekk til madrassen ved lagring
- Madrassen skal lagres på en ren, tørr overflate (ikke gulv) uten skarpe gjenstander for å unngå skade på produktet.
- Ikke lagre madrassen i nærheten av varmekilder
- Beskytt madrassen fra direkte sollys

## 7.2 Gjenbruk

Denne madrassen er egnet til gjenbruk.

Vennligst gjennomfør følgende før gjenbruk:

1. Inspeksjon
  - a. Ved synlige skader, bytt skadet del
2. Rengjøring og desinfeksjon

## 7.3 Avhending

Demonter produktet og resirkuler komponentene i henhold til materialene.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# Notater

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# Notater

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bedtime AS

Stortingsgata 30

0161 Oslo

Tel. (+47) 67 11 10 80

[post@sofies.no](mailto:post@sofies.no)

[www.sofies.no](http://www.sofies.no)



**BEDTIME**  
HEALTHCARE