


BEDTIME
HEALTHCARE

Quick Guide

Custom Care

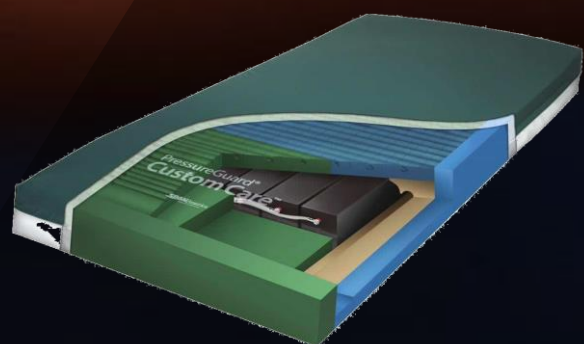

KONTROLLENHETEN

Komfort setting

Tillater innstilling av komfort-nivå fra 1 til 5. Trykk på knappene "Softer" eller "Firmer" for å gjøre madrassen henholdsvis mykere eller hardere. Et lys vil indikere hvilket komfort-nivå som er gjeldende.




Modus-valg: velg mellom "Alternate", "Float" eller "Auto-Firm"

"Alternate" modus: Utfører en dynamisk "A-B" sekvens der madrassens 4 luftsylindere tømmer og fyller luft over liggeflaten i en 10-minutters syklus.



"Float" modus: Madrassens statiske modus. Alle sylindrerne er jevnt oppblåst, og systemet opprettholder trykket automatisk ved å justere lufttrykket ved for eksempel forflytning på liggeflaten.

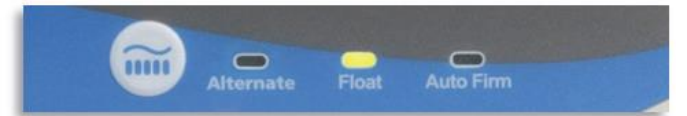

"Auto-Firm" modus: Madrassen stilles inn på det hardeste trykket (statisk). Dersom ingen endringer gjøres etter 20 minutter, stilles den tilbake til det sist brukte komfort-nivået, og "Alternate" modus.



Alarmer

"Audible Alarm On/Off": Når indikatorlyset er på, vil en alarm lyde dersom lavt trykk- eller strømbrudd-lyset er på. Trykk på knappen for å skru av alarmen. Alarmen kan også skrues av på forhånd dersom alarmlyd ikke er ønskelig ved for lavt trykk.



"Power Failure": Dersom systemet ikke får strøm, vil "power failure" lyset lyse. Trykk på knappen for å skru av alarmen.

"Low Pressure": Dersom denne lyser etter initial installasjon, eller ved flytting av madrassen/pumpen, kontroller først at alle luftslanger er ordentlig festet og ikke er i klem. Dersom alarmen fortsatt lyder etter 30 minutter, ring for service.