


BEDTIME
HEALTHCARE

Quick Guide

ProCell II H

Quick Guide ProCell II Hybrid

1. Bryter
2. Komfortknapp
3. Knapp for statisk/vekseltrykk funksjon
4. Nullstilling av alarm
5. Normaltrykk/alarm ved lavt trykk

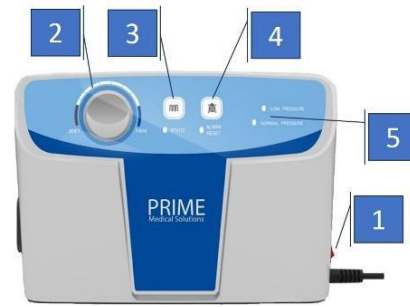

➤ Bryter (1):

Bryteren er plassert på høyre side av pumpen. Bruk av PÅ/AV-bryteren fungerer som START/STOPP for pumpefunksjonen.

➤ Komfortknapp (2):

Slå på komfortknappen for å la systemet fungere for optimal pasientkomfort.

➤ Knapp for statisk/alternerende funksjon (3):

Trykk på knappen for statisk/alternerende funksjon for å sette systemet i statisk eller alternerende modus.

Sørg alltid for at systemet endres til alternerende modus etter bruk av statisk modus. Lampen vil ikke lyse i alternerende modus.

➤ Nullstilling av alarm (4):

Den audiovisuelle alarmen vil bli utløst når trykket er for lavt. For å slå av lydalarmen, trykker du på nullstillingsknappen. Den visuelle alarmen vil blinke. Trykk på nullstillingsknappen igjen for å aktivere alarmen på nytt.

➤ Normaltrykk/lavtrykksalarm (5):

Normaltrykk: En visuell (grønn) lampe indikerer at trykket har nådd et forhåndsinnstilt eller brukerdefinert nivå.

Lavtrykksalarm: En visuell (gul eller rød) lampe indikerer at trykket har falt under forhåndsinnstilt eller brukerdefinert nivå.

Hybrid luftmadrasser

Hybrid luftmadrassene består av en bunn, flere celler, et slangesett og et avtagbart trekk.

Det treveis slangesettet er fleksibelt og har en antiknekkfunksjon slik at luftsirkulasjonen ikke hindres.

Det avtakbare madrassetrekket har vannsperre og glidelås som hindrer væskeinntrengning, og er lett å ta av bunnen av hybrid luftmadrassen.

Minimum og maksimal brukervekt er på Hybrid madrassen er 30 til 150kg.

Hybridluftmadrassene består av tre deler:

En hoveddel: en høykvalitets skumkombinasjon for å støtte forebygging/behandling av trykksår på hodet. (størrelse 90 x 27 x 17 cm) (IKKE på bildet)

En midtseksjon som består av 12 luftceller med en fullverdig antidecubitus skumkombinasjon med en høyde på 14 cm.

En hældel bygget opp som midtdelen, men 2 cm lavere for å holde hælene til pasientene frie for trykk.

Hybridluftmadrassen har en 1 i 3 alternerende effekt, noe som øker komforten til pasienten betydelig.

Hver celle er koblet til slangesettet med en Quick release-kobling som tillater at deler av madrassen blir helt trykkavlastet.