

BEDTIME
HEALTHCARE

Quick Guide

ProCell V



Pumpe

Funksjonene til ProCell V-pumpene er beskrevet i detalj nedenfor.

ProCell V

1. Bryter

2. Statisk/alternerende funksjon

3. Manuell modus (hold inne i 3 sek.)


4. Komfortinnstilling

5. Stellefunksjon/autofirm (trykk 3 sek.)

6. Nullstilling av alarm – systemfeil

7. Nullstilling av alarm – lavt trykk

8. Panellås (trykk 3 sek.)

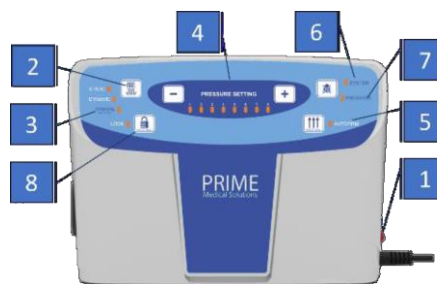

➤ Bryter (1):

Bryteren er plassert på høyre side av pumpen. Bruk av PÅ/AV-bryteren fungerer som START/STOPP for pumpefunksjonen.

➤ Statisk/alternerende funksjon (2):

Trykk på knappen for statisk/alternerende funksjon for å sette systemet i statisk eller alternerende modus.

➤ Manuell modus (hold inne i 3 sek.) (3):

Hvis den automatiske innstillingen ikke gir ønsket komfortnivå, kan den stilles inn manuelt ved å slå på denne knappen. Manuell modus fungerer sammen med både statisk og alternerende bruk. Hold inne i 3 sek. igjen for å gå tilbake til automatisk drift.

MERK:

I noen tilfeller kan det være ønskelig å aktivere manuell modus og justere innstilt trykk mer nøyaktig i henhold til brukerens morfologi eller stilling.

1. Hvis fotcellene kobles fra madrassen, bør manuell modus aktiveres.

2. I sittende stilling kan det være nødvendig å øke trykket ved å aktivere manuell modus.

3. Hvis trykkpunkter og vekt har et annet forhold, bør innstilt trykk justeres manuelt (f.eks. ved amputasjon og annet)

MERK:

For et passende trykk, kan all informasjon finnes i delen Betjening av enheten, Generelt, Manuell kontroll.

➤ Komfortinnstilling (4):

Åtte lamper viser trykkinnstillingen i automatisk modus (standard).

I manuell modus kan du velge mellom åtte komfortinnstillinger for å gi pasienten optimal komfort med knappene "-" og "+".

➤ Stellefunksjon/autofirm (hold inne 3 sek.) (5):

Trykk inn knappen for å sette luftmadrassen i Autofirm modus, noe som letter pleie og stell. Går automatisk tilbake til forrige innstilling etter 30 minutter.

➤ Nullstilling av alarm – systemfeil (6):

• Den visuelle alarmeren (A.A_A.A_A.A___, 2 raske påfølgende blinkende intervaller følger hverandre) vises når pumpen trenger vedlikehold, alarmlampen vil blinke uten lyd. (SERVICEVARSEL)

For å slå av den visuelle alarmeren, trykker du på alarm knappen (6/7).

• Audiovisuell alarm (A.A_A.A_A.A_..., 2 raske påfølgende blinkende intervaller følger hverandre) utløses når pumpen oppdager en systemfeil, og alarmlampen vil blinke og det avgis en lyd. (SYSTEMFEIL).

For å slå av lydalarmeren, trykker du på alarm knappen (6/7). Den visuelle alarmeren fortsetter å blinke. Trykk på alarm knappen (6/7) for å aktivere lydalarmeren på nytt. Kontakt forhandler for ytterligere trinn.

➤ Nullstilling av alarm – lavt trykk (7):

• AUDIOVISUELL alarm (A_A_A___, blinker med jevnt intervall) utløses når trykket er for lavt – alarmlampen blinker og en tone avgis. (ADVARSEL OM LAVT TRYKK).

For å slå av lydalarmeren, trykker du på nullstillingsknappen. Den blinkende visuelle alarmindikatoren fortsetter å blinke (eller stopper når innstilt trykk er nådd). Trykk på alarm knappen igjen for å aktivere lydalarmeren på nytt.

➤ Panellås (8):

Pumpen låses automatisk etter 5 minutter hvis den ikke er i gang, eller hvis knappen holdes inne i 3 sekunder. For å låse opp, holder du knappen inne i 3 sekunder.